

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP IMC	Procedura Standard de Operare nr. CTS/15/10
Denumirea instituției	
TITLUL: Spălarea eritrocitelor pentru examinări imunohematologice (metoda automată și manuală)	CTS-Banca de sânge denumire departament/secție/laborator

I. SCOPUL:

De a asigura calitatea procesului de spălare a eritrocitelor pentru examinările imunohematologice.

II. REAGENȚI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ȘI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR

Sistem de laborator pentru spălarea eritrocitelor

Centrifugă de laborator

2.2. MATERIALE CONSUMABILE

Eprubete (10 X 75mm, 12 X 75mm)

Soluție fiziologică de 0,9%

2.3. ALTE MATERIALE

Nu se aplică

III. ÎNREGISTRAREA ȘI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Nu se aplică

IV. PROCEDURA:

4.1 Spălarea automată

4.1.1 Puneți în funcțiune sistemul în corespundere cu PSO "Activitatea sistemului de laborator pentru centrifugarea eprubetelor și spălarea eritrocitelor" aprobată la nivel de instituție.

4.1.2 Plasați eprubeta (-ele) cu eritrocitele (0,5-1,0 ml), care necesită a fi spălate, în suportul spălătorului.

Atenție: atrageți atenția dacă sistemul a realizat balansarea automată a eprubetelor.

4.2 Spălați eritrocitele de 3 ori, apăsând pe secțiunea corespunzătoare a ecranului sau pe butonul pentru 3 spălări.

4.2.1 După ultima spălare, verificați dacă:

- Soluția fiziologică (NaCl) a fost eliminată.
- A rămas un "buton" uscat de eritrocite în fiecare eprubetă (minimum soluție fiziologică rămasă în fiecare eprubetă).
- Mărimea butonului de eritrocite este consistentă (aproximativ 3 - 4 mm în diametru).

4.3 Spălarea Manuală

4.3.1 Puneți în funcțiune centrifuga de laborator în corespundere cu PSO "Activitatea la centrifuga de laborator" aprobată la nivel de instituție.

4.3.2 Suplimentați eprubetele cu eritrocite (0,5-1,0 ml), care necesită a fi spălate, cu soluție fiziologică. Direcționați soluția fiziologică (NaCl) spre fundul eprubetei în așa fel, încât eritrocitele să fie amestecate omogen. Lăsați aproximativ 1 cm de la partea superioară a eprubetei goală.

Atenție: evitați contaminarea eprubetelor atunci când dispensați soluție fiziologică (NaCl) în câteva eprubete.

4.3.3 Centrifugați eprubeta (-le) timp de 45-60 sec la 1500 ± 200 rpm.

Atenție: verificați dacă a fost realizată balansarea eprubetelor.

4.3.4 După centrifugare eritrocitele sunt tasate la fundul eprubetei. Dacă pe perețele lateral al eprubetei se formează o bandă de eritrocite, timpul de centrifugare trebuie mărit până când toate eritrocitele se amplasează pe fundul eprubetei.

4.3.5 Decantați soluția fiziologică (NaCl) din eprubetă (-e), inversând-o rapid. Lăsați "butonul" de eritrocite format cât mai intact.

4.3.6 Întoarceți eprubeta (-ele) invers. Agitați-le ușor, pentru a disloca "butonul" de eritrocite.

4.3.6 Repetați etapele 4.3.2 - 4.3.5 pentru cele 3 spălări necesare.

4.3.7 După ultima spălare, verificați dacă:

- A rămas o cantitate minimă de soluție fiziologică (NaCl), înlăturând-o atent prin aspirație.
- Mărimea butonului de eritrocite este consistentă (aproximativ 3 - 4 mm în diametru).

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP IM	Procedura Standard de Operare nr. CTS/15/10
Denumirea instituției	
TITLUL: Spălarea eritrocitelor pentru examinări imunohematologice (metoda automată și manuală)	CTS-Banca de sânge denumire departament/secție/laborator

V. REFERINȚE

CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., *Manualul european de utilizare rațională a sângelui*, Scoția 2010, 64 p.

ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., *Manualul tehnic și standardele pentru băncile de sânge și serviciile de transfuzie, ediția 17*, Bethesda, Maryland, 2012, 1039 p.

CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORȘ M., *Ghidul național în transfuziologie*, Chișinău 2011, 126 p.

VI. ANEXE

Nu se aplică