







<b>Ministerul Sănătății Republica Moldova</b> <b>IMSP IMȘiC</b> <hr/> Denumirea instituției	<b>Procedura Standard de Operare</b>  <b>nr. CTS/17/51</b>
<b>TITLUL:</b> <b>Acivitatea de operare la agitatorul,</b> <b>incubatorul pentru plachete Helmer</b>	<b>Cabinetul de transfuzie a sîngelui</b> <hr/> denumire departament/secție/laborator

## I. SCOPUL:

De a asigura calitatea în activitatea agitatorului,incubatorului de plachete Helmer la etapa de păstrare a plachetelor în subdiviziune.

## II. REAGENȚII, MATERIALE CONSUMABILE, STANDARDE, TEHNICĂ ȘI ECHIPAMENT

### 2.1 ECHIPAMENT NECESAR:

- Agitator,incubator pentru plachete;
- Rețea electrică;
- Accesorii;
- Covoară dielectric;

### 2.2 ALTE MATERIALE:

Tampoane de tifon.  
Vas pentru prelucrare.

### 2.3 REACTIVE:

Soluție dezinfectantă.

## III. ÎNREGISTRARERA ȘI RAPORTAREA REZULTATELOR:

- Registru de monitorizare a activității echipamentului;
- Registru de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical;
- Fișa de monitorizare a programului de prelucrare sanitară agitatorului, incubatorului de plachete Helmer.

## IV. PROCEDURA:

- Se conectează cablul de alimentare la rețea electrică;
- Se aplică intrerupătorul în poziția ” CONECTAT”;
- Se monitorizează parametrii temperaturii la + 22<sup>0</sup>C;
- Se deschide ușa agitatorului de plachete;
- Se extrag sertarele detașabile, ridicându-se ușor;
- Se repartizează în poziție orizontală componentele CPL;
- Se așază polițele în poziția inițială;
- Se închide ușa agitatorului incubatorului de plachete;

**ATENȚIE! Agitatorului incubatorului de plachete este dotat cu panou electronic de înregistrare grafic și electronic a temperaturii.**

<b>Ministerul Sănătății Republica Moldova</b> <b>IMSP IMșiC</b> <hr/> Denumirea instituției	<b>Procedura Standard de Operare</b>  <b>nr.CTS/17/51</b>
<b>TITLUL:</b> <b>Acivitatea de operare la agitatorul,</b> <b>incubatorul pentru plachete Helmer</b>	<b>Cabinetul de transfuzie a sîngelui</b> <hr/> denumire departament/secție/laborator

- Se monitorizează diapazonul temperaturii în agitatorul incubatorul de plachete după informația de pe panoul superior a aparatului și după termometrul aplicat în interiorul lui

**ATENȚIE! REGIMUL DE PĂSTRARE A CPL ESTE + 22<sup>0</sup> C**

Se înregistrează diapazonul temperaturii de două ori pe zi în ”Registru de monitorizare a regimului de temperatură a echipamentului medical”.

Se prelucrează săptămînal partea internă și polițete agitatorului de plachete cu soluție dezinfectantă cu înregistrarea în ” Fișa de monitorizare a programului de prelucrare sanitară a agitatorul incubatorul de plachete la necesitate,zilnic”.

**V. REFERINȚE:**

1 Instrucțiune de exploatare a agitatorul incubatorul de plachete.

**IV. ANEXE:**

Prelucrarea agitatorului incubatorului de plachete tip HELMER.

**Prelucrarea**  
**AGITATORULUI INCUBATORULUI DE PLACHETE HELMER**

1. Se deconectează aparatul de la rețeaua electrică.
2. Se verifică dacă intrerupătorul principal este în poziția "Deconectat".
3. Se prelucrează interiorul aparatului cu soluție dezinfectantă, la necesitate zilnic.
4. După prelucrare se lasă ușa ușor întredeschisă pentru a preveni acumularea umidității reziduale.