







Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  IMSP IMȘIC	Procedura Standard de Operare nr. CTS/17/58
Denumirea instituției	
TITLUL: Activitatea de operare la centrifuga ROTOFIX 32A	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secție/laborator

**I. SCOPUL:** De a asigura calitatea la etapa de activitate la centrifuga ROTOFIX 32A.

**II. REAGENȚII, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICĂ ȘI ECHIPAMENT:**

**2.1. ECHIPAMENT NECESAR:**

- Centrifuga ROTOFIX 32A.

**2.2. ALTE MATERIALE:**

- Eprubeta de tip vacutainer cu proba sangvină.

**III. ÎNREGISTRAREA ȘI RAPORTAREA REZULTATELOR:**

- Registrul de monitorizare a activității echipamentului medical.

**IV. PROCEDURA:**

- Zilnic se verifică vizual dispozitivul la defecte mecanice, la defecte carcasă, cabluri dezgolite, alarme. La necesitate se apelează la bioingenerul;
- Se conectează Centrifuga ROTOFIX 32A la sursa de energie electrică.
- Se conectează butonul închis/deschis din spatele centrifugii în poziția \*Deschis\*;
- Se vizualizează pe ecran numărul de rotații și timpul de centrifugare (programate preventiv);

**Notă: Programarea numărului de rotații se efectuează prin apăsarea butonului RPM/RCF, dar Programarea timpului se efectuează prin apăsarea butonului t**

- Se deschide capacul;
- Se așează eprubetele în godeuri;
- Se închide capacul;
- Se conectează butonul \*START\*;
- Se deschide capacul centrifugii, după expirarea timpului selectat;
- Se scot eprubetele din godeuri;
- Se închide capacul;
- Se conectează butonul închis/deschis din spatele centrifugii în poziția \*Închis\*;
- Se deconectează centrifuga de la sursa de energie electrică.

**V. REFERINȚE:**

- Manualul de utilizare a centrifugei ROTOFIX 32A.

**VI. ANEXE:**

Nu se aplică.